



Schenken Sie Ihren Patienten ein strahlend weißes Lächeln


Opalescence

Tooth Whitening

Ein strahlend weißes Lächeln gibt Ihren Patienten das Selbstvertrauen, wieder häufiger zu lachen. Mit Opalescence Go können Ihre Patienten Ihre Zähne ganz einfach aufhellen – wo immer und wann immer sie wollen. Wenn das kein Grund zum Strahlen ist!

Leistungsstarke, professionelle Zahnaufhellung "to go"

- Das einzigartige Material des UltraFit™ Trays bietet einen besonders komfortablen Sitz und passt sich dem individuellen Lächeln des Patienten an
- Die Abdeckung von Molar zu Molar gewährleistet den Kontakt des Gels mit den Seitenzähnen
- Dank der ausgezeichneten Adaption des UltraFit Trays bleibt das Gel während der Aufhellung mit den Zähnen optimal in Kontakt
- Mit 6% Wasserstoffperoxid (Tragezeit 60-90 Minuten)

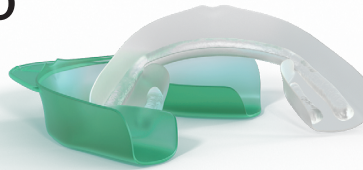

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

Opalescence Go Patient Kits



Geschmacksrichtung	6%
Mint	4634
Melon	3592

Jedes Kit enthält 10 Blisterpackungen mit je 1 Tray für OK und UK
1 x 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

Opalescence Go Patient Kits 6 St.



Geschmacksrichtung	6%
Mint	4639
Melon	3593

je 10 x OK-/UK-Trays pro Kit
1 x 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

Opalescence Go Mini Kits



Geschmacksrichtung	6%
Mint	4644
Melon	3599

Jedes Kit enthält 4 Blisterpackungen mit je 1 Tray für OK und UK

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

Opalescence Go Mini Kits 12 St.



Geschmacksrichtung	6%
Mint	4649
Melon	3600

je 4 x OK-/UK-Trays pro Kit

Anwendung

Lesen Sie die Packungsbeilagen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Produkte anwenden.



Produkt aus der Verpackung nehmen. „U“ – OK-Tray, „L“ – UK-Tray.



Das OK-Tray auf den Zähnen positionieren.



Fest zubeißen; dann 2 Sekunden lang die Schiene ansaugen.



Das farbige äußere Tray entfernen und das weiße innere Tray auf den Zähnen belassen. Den Vorgang für das UK-Tray wiederholen.



Nach der angegebenen Tragezeit die Trays herausnehmen und die Zähne putzen.



Erfahren Sie mehr über die Opalescence Whitening Produkte. Hier geht's zur Broschüre!

QR Code scannen

Folgen Sie uns!



de.ultradent.blog

© 2025 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

UPP 298-DE 12-2024

ULTRADENTPRODUCTS.COM